



Product/ Product:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:	
Wzór/Artwork:	ULT-003806_1_1	
Preparat/ Product:	SOFTEYE LIPID	
Czcionki/ Fonts:	Tekst/Text: Arial 11 pt Nazwa/Name: -	
Farmakod/ Pharmacode:	XXX	
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 244 x 220 mm	
Kolorystyka/ Colours:		
Opracował/ Prepared by:	14.03.2019 W.Terlicka	

OPIS SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIU:



Wytwórca



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Górny limit temperatury




Należy zapoznać się z treścią ulotki




Numer partii



Termin ważności

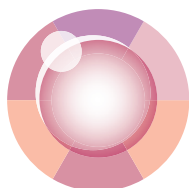Wyrób jednorazowego użytku / nie używać
powtórnieWysterylizowane przy użyciu aseptycznych technik
wytwarzania

SOFTEYE
LIPID

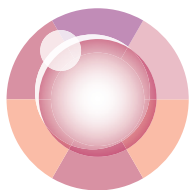

SOFTEYE LIPID

Wyrób medyczny

**Sterylna emulsja do oczu zawierająca naturalne lipidy,
bez konserwantów.**

Wskazania

SOFTEYE LIPID nawilża i nawadnia powierzchnię oka łagodząc objawy suchości i dyskomfortu ze strony oczu różnego pochodzenia.

SOFTEYE LIPID jest wskazany do stosowania w łagodzeniu dyskomfortu ze strony oczu związanego ze stosowaniem soczewek kontaktowych.

Skład

Olej sojowy, naturalne fosfolipidy, trometamol, glicerol, woda oczyszczona.

Zawartość opakowania

20 pojemników jednodawkowych po 0,3 ml.
1 ulotka informacyjna.

Charakterystyka i mechanizm działania

SOFTEYE LIPID to mlecznobiała emulsja do oczu zawierająca wodę oraz mieszaninę naturalnych lipidów o właściwościach nawilżających i nawadniających powierzchnię oka.


Po podaniu do worka spojówkowego zarówno wodne, jak i lipidowe składniki preparatu **SOFTEYE LIPID** łączą się z filmem łzowym tworząc barierę ochronną, która ogranicza odparowywanie.

Dawkowanie i sposób podawania

Zakraplać 1 kroplę preparatu **SOFTEYE LIPID** do worka spojówkowego 4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Przed zastosowaniem należy umyć/zdezynfekować ręce.
2. Upewnić się, że pojemnik jednodawkowy jest nienaruszony.
3. Oderwać pojemnik jednodawkowy od paska.
4. Otworzyć, przekręcając i odrywając górną część.
5. Zakropić preparat **SOFTEYE LIPID** do oka, unikając dotykania oka lub jakiegokolwiek innej powierzchni końcówką pojemnika.

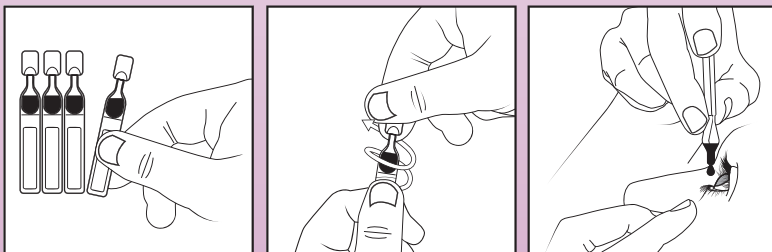

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki produktu.

Środki ostrożności i ostrzeżenia

⊗ Nie stosować produktu **SOFTEYE LIPID**, jeśli pojemnik jednodawkowy jest otwarty lub uszkodzony.

Zawartość pojemnika jednodawkowego należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Wszelkie pozostałości produktu nie mogą być używane, ponieważ **SOFTEYE LIPID** nie zawiera konserwantów, a pozostałości produktu mogą ulec zanieczyszczeniu, tym samym narażając oko na ryzyko zakażenia.

Po otwarciu zaleca się przechowywanie pozostałych pojemników jednodawkowych w tej samej aluminiowej torebce. Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 20 dni po otwarciu aluminiowej torebki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

Nie wyrzucać zużytego produktu do środowiska naturalnego.

Produkt **SOFTEYE LIPID** powinien być podawany dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach manualnych jedynie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Badania zgodności wykazały, że produkt nie zmienia właściwości fizycznych, ani przejrzystości soczewek kontaktowych.

Interakcje z innymi okulistycznymi lekami i wyrobami medycznymi

Zaleca się podawanie innych okulistycznych leków lub wyrobów medycznych w odstępie 20 minut po zakropleniu produktu **SOFTEYE LIPID**.

Możliwe działania niepożądane

Po podaniu preparatu **SOFTEYE LIPID** może pojawić się krótkotrwałe uczucie niewyraźnego widzenia, które szybko ustępuje na skutek mrugania.

Sporadycznie może występować lekkie i przemijające uczucie kłucia.

W przypadku utrzymywania się objawów zaleca się konsultację z okulistą.

WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO DO OKA.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.



SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) – WŁOCHY

DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pełplińska 19,
83-200 Starogard Gdański



SOFTEYE LIPID to sterylny wyrób medyczny.

Data zatwierdzenia ostatniej wersji: kwiecień 2018

CE 0373