


Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>ULT-007527_2</b>		
Preparat/ Product:	<b>Lacrimonatura Plus /COC Farmaceutici/</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 130 x 180 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Myriad Pro 8 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 <b>BLACK</b>	Opracował/ Prepared by:	07.12.2022 M.Małodzińska

## Lacrimal® Natura Plus

**Lacrimal® Natura Plus** to sterylny roztwór do oczu o fizjologicznym pH, dostępny w wielodawkowej butelce o pojemności 10 ml.

Głównym działaniem wyrobu jest nawilżanie powierzchni oka, dzięki zawartości hialuronianu sodu i hypromelozy.

**Lacrimal® Natura Plus** jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia zaczerwienienia, zmęczenia, dyskomfortu i suchości oczu.

Hialuronian sodu jest stosowany ze względu na swe właściwości nawilżające które zapobiegają suchości oczu.

Tworzy on powłokę chroniącą nabłonek rogówki przed wpływem czynników zewnętrznych.

Hypromeloza to polimer o właściwościach mukomimetycznych, który stabilizuje film łzowy na powierzchni rogówki poprzez tworzenie przezroczystej i lepko-sprężystej warstwy ochronnej.

Hialuronian sodu to molekula występująca naturalnie w tkankach organizmu wymagających stałego nawilżenia (np. chrząstka, skóra, film łzowy), jest on zatem substancją biozgodną. W połączeniu z hypromelozą zapewnia on intensywne i długotrwałe nawilżenie powierzchni oka.

Oba te składniki przyciągają i wiążą wodę z otoczenia oraz tworzą nawilżającą warstwę na powierzchni oka. Ponieważ ta lepka osłona uwalnia wodę stopniowo, **Lacrimal® Natura Plus** zapewnia długotrwałe nawilżenie oczu.

Ponadto **Lacrimal® Natura Plus** zawiera chlorek sodu i bufor boranowy gwarantujące fizjologiczne właściwości roztworu oraz wyciągi wodne z rumianku, aloesu, róży i borówek, które zapewniają działanie nawilżające.

**Lacrimal® Natura Plus** nie zawiera konserwantów ani buforów fosforanowych.

**Lacrimal® Natura Plus** może być stosowany z soczewkami kontaktowymi.

### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

**Lacrimal® Natura Plus** działa jako środek nawilżający na powierzchni oka, łagodząc zaczerwienienie, zmęczenie oraz dyskomfort oczu i śluzówki oczu spowodowane czynnikami środowiskowymi (wiatr, dym, zanieczyszczenia, długotrwała ekspozycja na słońce, sól i wodę morską) i długotrwałym korzystaniem z komputera. Przeciwdziała on także objawom zespołu suchego oka.

**Lacrimal® Natura Plus** łagodzi również stres wywołany stosowaniem soczewek kontaktowych i zabiegami chirurgicznymi w obrębie powierzchni oka.

Dodatkowo krople wykazują optymalną lepkość, dzięki której są szczególnie przydatne podczas zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych oraz pozwalają

uniknąć dokuczliwego zaczerwienienia oczu, głównie u osób dorosłych, u których łatwiej dochodzi do destabilizacji filmu łzowego.

### SKŁAD

sól sodowa kwasu hialuronowego (0,2%), hypromeloza (0,2%), wyciąg wodny z dzikiej róży (*Rosa canina*), wyciąg wodny z aloesu (*Aloe barbadensis Miller*), wyciąg wodny z rumianku (*Chamomilla recutita*), wyciąg wodny z borówki (*Vaccinium myrtillus*), kwas borny, tetraboran sodu dziesięciowodny, chlorek sodu, woda do iniekcji

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Przed użyciem dokładnie umyć i osuszyć ręce;
- Przed pierwszym użyciem zerwać plombę zabezpieczającą;
- Zdjąć zakrętkę ochronną;
- Ścisnąć butelkę i zakropić 2-3 krople do każdego oka; nie należy stosować więcej niż 10 dawek (2-3 krople na oko) na dobę;
- Po podaniu każdej kropli należy odczekać kilka sekund bez ściskania butelki, co pozwoli na zaciągnięcie z powrotem odpowiedniej ilości powietrza przez jałowy system filtrujący, w przeciwnym razie trudniejsze jest wyciskanie kropli;
- Im mniej produktu pozostaje w butelce, tym silniej należy ją ścisnąć w celu aplikacji odpowiedniej ilości produktu. Jest to związane z właściwościami systemu zamknięcia, który ma zachowywać jałowość oraz chemiczne i fizyczne właściwości roztworów niezawierających konserwantów. W butelce zawsze pozostaje niewielka ilość roztworu;
- Jeśli kropla nie trafi do oka próbę zakropienia należy powtórzyć;
- W razie potrzeby powtórzyć proces dla drugiego oka;
- Po użyciu strząsnąć pozostałą kroplę z końcówki zakraplacza;
- Natychmiast po użyciu należy zamknąć butelkę za pomocą zakrętki;
- Nie nakładać zakrętki, dopóki butelka jest ściśnięta;
- Nie dotykać niczego końcówką zakraplacza, w tym ani oczu, ani palców;
- Produkt może być używany przez maksymalnie 3 miesiące od pierwszego otwarcia;
- **Lacrimal® Natura Plus** można stosować z soczewkami kontaktowymi.

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt zawiera następujące substancje stwarzające zagrożenie sklasyfikowane jako substancje CMR w stężeniach powyżej 0,1% w/w.: kwas borny i tetraboran sodu dziesięciowodny. Wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących piersią;
- Po zastosowaniu wyrobu widzenie może być tymczasowo niewyraźne. Może również wystąpić przemijające, niewielkie pieczenie/kłucie/podrażnienie wskutek podrażnienia oka. Jeśli objawy te nie ustępują lub ulegają nasileniu, należy zgłosić się do lekarza;
- Wyrób przeznaczony do użycia tylko do oczu;
- Wyrób powinien być stosowany przez jedną osobę;
- Nie używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nie jest prawidłowo zamknięte przy pierwszym otwarciu;
- Nie stosować, jeśli widoczne są cząstki i/lub zmiany koloru roztworu;
- Podczas aplikacji nie dotykać końcówką zakraplacza ani oka, ani żadnej innej powierzchni;
- Nie stosować wyrobu po terminie ważności podanym na opakowaniu;
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania wyrobu, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem;
- Nie stosować w przypadku nietolerancji na jakikolwiek składnik produktu i/lub w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny *Asteraceae* i/lub *Liliaceae*, i/lub *Ericaceae*, i/lub *Rosaceae*;
- Nie są znane interakcje z lekami lub innymi kroplami do oczu, jednakże należy zachować 15-minutowy odstęp pomiędzy podaniem innych kropli do oczu;
- Wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami;
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci;
- Do użyciu zewnętrznego, nie połykać;
- Nie należy próbować manipulować zakraplaczem butelki ani demontować go;
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do Producenta i do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Warszawa  
Tel.: + 48 22 49 21 301  
Faks: + 48 22 49 21 309  
[www.urpl.gov.pl](http://www.urpl.gov.pl)

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Dotychczas nie są znane żadne działania niepożądane.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

## OPAKOWANIE

Jedna butelka zawierająca 10 ml sterylnego roztworu bez konserwantów.

## OKRES WAŻNOŚCI

Termin ważności podany na kartoniku i na butelce.

CE 0051

MD

STERILE A

#

DT/01/DT/002



**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15

40019 - Sant'Agata Bolognese (BO)

Włochy



**ZF Polpharma S.A.**

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

**Ostatnia aktualizacja 02.01 z 10.2022**