


Product/ Product:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:
Wzór/Artwork:	ULT-008709_1
Preparat/ Product:	SOFTEYE BLEPHA+ CHUSTECZKI DO OCZU Z KOMPRESEM
Czcionki/ Fonts:	Tekst/Text: Arial 8 pt Nazwa/Name: -
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 150 x 210 mm
Kolorystyka/ Colours:	
Opracował/ Prepared by:	25.01.2024 M.Małodzińska



SOFTEYE[®]
BLEPHA+

ULT-008709_1

BEZ KONSERWANTÓW

CHUSTECZKI OKULISTYCZNE DO CODZIENNEJ HIGIENY POWIEK DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI W ZESTAWIE Z OGRZEWALNYM KOMPRESEM NA OKO

WSKAZANIA:

SOFTEYE BLEPHA+ to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter[®] (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

Formuła **SOFTEYE BLEPHA+** opiera się na naturalnych składnikach przeciwzapalnych i odkażających, dzięki czemu produkt ten przynosi szybką ulgę.

Właściwa higiena powiek jest kluczowa w przypadku potencjalnego i trwającego stanu zapalnego i infekcji.

Dzięki zastosowaniu formuły Hy-Ter[®] wyrób medyczny **SOFTEYE BLEPHA+** jest wskazany do higieny powiek i rzęs w leczeniu zapalenia brzegów powiek, zapalenia powiek i spojówek, a także w przypadku gradówki i jęczmienia.

W tylnym zapaleniu brzegów powiek dochodzi do zablokowania ujść gruczołów Meiboma. Są one zlokalizowane na wewnętrznej stronie powiek; ich wydzielina zapobiega parowaniu filmu łzowego. Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść tych gruczołów, dzięki czemu mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego.

Działanie oczyszczające z użyciem samej chusteczki jest wskazane pomocniczo w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek, a także jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych.

SKŁAD:

Woda, PEG / PPG – 20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter[®] (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzjanie amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoilooamino kwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenylotylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

OPAKOWANIE

14 jednorazowych chusteczek + 1 ogrzewalny kompres

SPOSÓB UŻYWANIA:



1. Rozgrzej kompres, aż zmieni barwę. W tym momencie kompres osiągnął temperaturę odpowiednią do wykonania efektywnego masażu oka.
W przypadku, gdyby z upływem czasu a w terminie ważności wyrobu, kompres utracił zdolność do zmiany zabarwienia, to właściwości rozgrzewające będą nadal gwarantowane.
JAK ROZGRZAĆ KOMPRES

Kompres można rozgrzać następującymi sposobami:

1. Trzymaj kompres pod bardzo gorącą wodą z kranu do momentu zmiany zabarwienia.
2. Trzymaj za skrzydełko kompres zanurzony w gorącej wodzie do momentu zmiany zabarwienia.

Przed wykonaniem masażu oka zawsze sprawdź temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony swojego nadgarstka. Jeśli jest zbyt gorący, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem.

2. Trzymaj ciepły kompres za skrzydełko, przez 3-5 minut masuj powiekę z lekkim naciskiem.
3. Zaraz po zaaplikowaniu kompresu na oko otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.

4. Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kąca oka do zewnętrznego, cały czas trzymając oko zamknięte.

Po użyciu opłucz kompres wodą i umieść z powrotem w opakowaniu. Jeśli kompres nie powróci do pierwotnego koloru, schowaj go na noc do lodówki. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy kompres nie jest uszkodzony.

Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Po użyciu umyj ręce.

Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem wyrobu medycznego. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania niepożądanego należy skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Do użytku zewnętrznego: do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach.

Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik.

W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie.

Należy uważnie przestrzegać instrukcji dotyczących ogrzewania kompresu i sprawdzania jego temperatury.

Nie stosować ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności.

Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem.

Nie stosować, gdy saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie przebiegać kompresu i/lub połykać produktu.

Po wykorzystaniu ostatniej chusteczki należy wyrzucić kompres.

W przypadku stosowania miejscowo innych produktów, należy odczekać 15 minut przed użyciem

SOFTEYE BLEPHA+.

Ze względu na brak danych dotyczących używania produktu w okresie ciąży czy karmienia piersią, przed zastosowaniem **SOFTEYE BLEPHA+** należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

PRZECHOWYWANIE

Nie należy stosować wyrobu medycznego **SOFTEYE BLEPHA+** po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.

Termin ważności odnosi się do nienaruszonego i właściwie przechowywanego produktu.

Puste opakowanie wyrobu medycznego powinno być zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy to również niewykorzystanego przeterminowanego produktu.

OPIS SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA OPAKOWANIU:



= wyrób jednorazowego użytku



= dołączona instrukcja używania



= nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



= po użyciu wyrzucić do kosza na śmieci



9°C = temperatura przechowywania



= producent



= numer partii



= termin ważności

WYRÓB MEDYCZNY



NTC Srl
Via Luigi Razza, 3
20124 Mediolan
Włochy

DYSTRYBUTOR
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański



SOFTEYE[®]
BLEPHA+

Data ostatniej weryfikacji instrukcji: 05.2020